

Instrukcja użycia testu nr 10 „odczynnik Special Opiates” (NARK20010)

v.2020.1

UŻYCIE: Wykrywanie składników substancji – Kodeina, Heroina, Morfina, Oksycodon i Fentanyl

UWAGA: Odczynnik Special Opiates jest testem wstępnym w systemie badania progresywnego narkotyków. W celu wykonania następnego kroku należy zwrócić się do Karty Kolorometrycznej. **Zastosowanie testu do wstępnej identyfikacji substancji wymaga potwierdzenia wyniku poprzez badania laboratoryjne.**

Test 10-Instrukcja:

1. Po usunięciu zapięcia należy umieścić w torebce niewielką ilość badanej substancji, która mieści się w kółku średnicy ok. 2 mm → O.
2. Po zamknięciu torebki zapięciem należy wstrząsnąć nią w taki sposób, aby badana substancja opadła na jej dno.
3. Trzymając torebkę napisami w swoją stronę, należy delikatnie ścisnąć środkową część ampułki w celu jej złamania. Następnie potrząsnąć torebką i zanotować zmiany kolorów i kolor ostateczny.

Analiza kolorów:

1. Po złamaniu ampułki mogą wystąpić następujące kolory:
 - kolor zielony występujący po upływie ok. 5 sek. sugeruje obecność kodeiny,
 - kolor purpurowy występujący po upływie ok. 5 sek. sugeruje obecność heroiny (białej, brązowej lub czarnej)/morfiny,
 - kolor żółty występujący po upływie ok. 5 sek. sugeruje obecność oksycodonu/fentanylu,
2. Jeśli nie pojawi się żaden kolor należy wykonać test za pomocą odczynnika Marquis'a.

OSTRZEŻENIE:

1. Większość odczynników zawiera silne kwasy. Po przeprowadzeniu badania należy użyć neutralizatora kwasowego z testu nr 06 lub N. Po wprowadzeniu neutralizatora torebka powinna być pozostawiona otwarta na czas 2 do 3 minut, a następnie ponownie zamknięta.
2. Po złamaniu ampułek nie należy ich dalej kruszyć.
3. Pierwsza pomoc:
 - Po wdychaniu:** Zapewnić doływ świeżego powietrza. Skonsultować się z lekarzem jeżeli objawy nie ustają.
 - Po połknięciu:** Natychmiast wezwać pomoc medyczną.
 - Po kontakcie skóry z substancją:** Zanieczyszczoną skórę zmyć dokładnie wodą i mydłem. Użyć kremu do rąk. Jeżeli wystąpi podrażnienie wynikłe z długotrwałego kontaktu i nie ustępuje, udać się do lekarza.
 - Po kontakcie oczu z substancją:** Szeroko otwarte oczy płukać przez co najmniej 15 min. Skonsultować się z lekarzem.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dostępna na życzenie.

UWAGA:

Nie umieszczać w torebce substancji innych niż Test nr 06 lub N.