

Instrukcja użycia testu nr 11 „odczynniki Meckego (zmodyfikowany)” (NARK20011)

v.2020.1

UŻYCIE: Wykrywanie-Heroina, Ekstazy (MDMA).

UWAGA: Test nr. 11 jest najlepszy do wykrywania heroiny brązowej.

Zastosowanie testu do wstępnej identyfikacji substancji wymaga potwierdzenia wyniku poprzez badania laboratoryjne.

Test11 -Instrukcja:

1. Po usunięciu zapięcia należy umieścić w torebce niewielką ilość badanej substancji, która mieści się w kółku średnicy ok. 2 mm → O.
2. Po zamknięciu torebki zapięciem należy wstrząsnąć nią w taki sposób, aby badana substancja opadła na jej dno.
UWAGA: Do umieszczenia heroiny w postaci mazi w torebce, należy użyć pincety.
3. Trzymając torebkę napisami w swoją stronę, należy delikatnie tamać ampułki od lewej do prawej.

Analiza kolorów:

1. Złam lewą ampułkę i wstrząsaj przez 30 sekund. Ujawnienie koloru purpurowego oznacza obecność MDMA. Heroina nie zostanie wykazana na tym etapie przez żaden kolor.
2. Złam prawą ampułkę i wstrząsaj przez 30-45 sekund. Heroina wykaże kolor jasno-zielony stopniowo ciemniejący w czasie około minuty. MDMA nie wykaże żadnego dodatkowego koloru.

UWAGA: Test ten powinien być używany razem z pozostałymi odczynnikami systemu badania progresywnego narkotyków NARK 2.

OSTRZEŻENIE:

1. Większość odczynników zawiera silne kwasy. Po przeprowadzeniu badania należy użyć neutralizatora kwasowego z testu nr 06 lub N. Po wprowadzeniu neutralizatora torebka powinna być pozostawiona otwarta na czas 2 do 3 minut, a następnie ponownie zamknięta.
2. Po złamaniu ampułek nie należy ich dalej kruszyć.
3. Pierwsza pomoc:
Po wdychaniu: Zapewnić doływ świeżego powietrza. Skonsultować się z lekarzem jeżeli objawy nie ustają.
Po połknięciu: Natychmiast wezwać pomoc medyczną.
Po kontakcie skóry z substancją: Zanieczyszczoną skórę zmyć dokładnie wodą i mydłem. Użyć kremu do rąk. Jeżeli wystąpi podrażnienie wynikłe z długotrwałego kontaktu i nie ustępuje, udać się do lekarza.
Po kontakcie oczu z substancją: Szeroko otwarte oczy płukać przez co najmniej 15 min. Skonsultować się z lekarzem.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dostępna na życzenie,

UWAGA:

Nie umieszczać w torebce substancji innych niż Test nr 06 lub N.