

# Instrukcja użycia testu nr 12

## TALWIN Reagent (NARK20012)

v.2020.1

**UŻYCIE:** Wykrywanie Talwin (Pentazocyna)

**UWAGA:** Odczynnik jest testem wstępnym w systemie badania progresywnego narkotyków. W celu wykonania następnego kroku należy zwrócić się do Karty Kolorometrycznej. **Zastosowanie testu do wstępnej identyfikacji substancji wymaga potwierdzenia wyniku poprzez badania laboratoryjne.**

### Test 12-Instrukcja:

1. Po usunięciu zapięcia należy umieścić w torebce 5 do 10 ziarenek badanej substancji (równowartość końcowej części urządzenia ładującego).
2. Po zamknięciu torebki zapięciem należy wstrząsnąć nią w taki sposób, aby badana substancja opadła na jej dno.
3. Trzymając torebkę napisami w swoją stronę, należy złamać amputki z lewej do prawej. Należy delikatnie ścisnąć środkową część amputki koniuszkiem kciuka i palca wskazującego i złamać amputkę.

### Analiza uzyskanych kolorów:

1. Należy złamać pierwszą amputkę i potrząsać delikatnie przez jedną minutę. Jeśli Talwin jest obecny w badanej próbce, pojawi się kolor purpurowy w ciągu następnej jednej lub dwóch minut.
2. Należy złamać drugą amputkę i delikatnie potrząsać. Jeśli Talwin jest obecny w badanej próbce, pojawi się kolor żółty w ciągu 15 sekund.

### OSTRZEŻENIE:

1. Większość odczynników zawiera silne kwasy. Po przeprowadzeniu badania należy użyć neutralizatora kwasowego z testu nr 06 lub N. Po wprowadzeniu neutralizatora torebka powinna być pozostawiona otwarta na czas 2 do 3 minut, a następnie ponownie zamknięta.

2. Po złamaniu amputek nie należy ich dalej kruszyć.

3. Pierwsza pomoc:

**Po wdychaniu:** Zapewnić doptyw świeżego powietrza. Skonsultować się z lekarzem jeżeli objawy nie ustają.

**Po połknięciu:** Natychmiast wezwać pomoc medyczną.

**Po kontakcie skóry z substancją:** Zanieczyszczoną skórę zmyć dokładnie wodą i mydłem. Użyć kremu do rąk. Jeżeli wystąpi podrażnienie wynikłe z długotrwałego kontaktu i nie ustępuje, udać się do lekarza.

**Po kontakcie oczu z substancją:** Szeroko otwarte oczy płukać przez co najmniej 15 min. Skonsultować się z lekarzem.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dostępna na życzenie.

### UWAGA:

Nie umieszczać w torebce substancji innych niż Test nr 06 lub N.