

Instrukcja użycia testu nr 15 „odczynnik Simona” (NARK20015)

v.2020.1

UŻYCIE: Wykrywanie-Metamfetamina, MDMA (Ecstasy).

UWAGA: Zastosowanie testu do wstępnej identyfikacji substancji wymaga potwierdzenia wyniku poprzez badania laboratoryjne.

Test 15-Instrukcja:

1. Po usunięciu zapięcia należy umieścić w torebce niewielką ilość badanej substancji, która mieści się w kółku średnicy ok. 2 mm → O.
2. Po zamknięciu torebki zapięciem należy wstrząsnąć nią w taki sposób, aby badana substancja opadła na jej dno.
3. Trzymając torebkę napisami w swoją stronę, należy delikatnie łamać ampułki od lewej do prawej.

Analiza kolorów:

1. Złam lewą ampułkę i lekko wstrząsaj przez 30 sekund, ale na tym etapie nie pojawi się żaden kolor.
2. Złam środkową ampułkę i delikatnie wstrząśnij – zgodnie z ogólnymi zasadami nie powinien pojawić się żaden kolor.
UWAGA: Test 15 ma szeroki zakres czułości dla różnych ilości metamfetaminy. Jeżeli substancja zostanie dodana w nadmiernej ilości, to już po złamaniu drugiej ampułki może pojawić się kolor niebieski. Jeżeli dodamy minimalną ilość substancji to kolor niebieski pojawi się dopiero po złamaniu prawej ampułki.
3. Złam prawą ampułkę i lekko wstrząśnij. Jeżeli w torebce znajduje się metamfetamina kolor niebieski pojawi się prawie natychmiast.

UWAGA:

Test ten powinien być używany razem z pozostałymi odczynnikami systemu badania progresywnego narkotyków NARK 2.

OSTRZEŻENIE:

1. Większość odczynników zawiera silne kwasy. Po przeprowadzeniu badania należy użyć neutralizatora kwasowego z testu nr 06 lub N.
2. Po wprowadzeniu neutralizatora torebka powinna być pozostawiona otwarta na czas 2 do 3 minut, a następnie ponownie zamknięta.
3. Po złamaniu ampułek nie należy ich dalej kruszyć.
4. Pierwsza pomoc:
Po wdychaniu: Zapewnić dopływ świeżego powietrza. Skonsultować się z lekarzem jeżeli objawy nie ustają.
Po połknięciu: Natychmiast wezwać pomoc medyczną.
Po kontakcie skóry z substancją: Zanieczyszczoną skórę zmyć dokładnie wodą i mydłem. Użyć kremu do rąk. Jeżeli wystąpi podrażnienie wynikłe z długotrwałego kontaktu i nie ustępuje, udać się do lekarza.
Po kontakcie oczu z substancją: Szeroko otwarte oczy płukać przez co najmniej 15 min. Skonsultować się z lekarzem.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dostępna na życzenie,

UWAGA:

Nie umieszczać w torebce substancji innych niż Test nr 06 lub N.