

Instrukcja użycia testu nr 01 „odczynnik Marquisa” (NARK2001)

v.2020.1

UŻYCIE: Wykrywanie składników substancji - Amfetamina, MDMA, Heroina, alkaloidy Opium

UWAGA: Odczynnik Marquisa jest testem wstępnym w systemie badania progresywnego narkotyków. W celu wykonania następnego kroku należy zwrócić się do Karty Kolorometrycznej. **Zastosowanie testu do wstępnej identyfikacji substancji, wymaga potwierdzenia wyniku poprzez badania laboratoryjne.**

Test 01 -Instrukcja:

1. Po usunięciu zapięcia należy umieścić w torebce niewielką ilość badanej substancji, która mieści się w kółku średnicy ok. 2 mm → O.
2. Po zamknięciu torebki zapięciem należy wstrząsnąć nią w taki sposób, aby badana substancja opadła na jej dno.
3. Trzymając torebkę napisami w swoją stronę, należy delikatnie ścisnąć środkową część amputki w celu jej złamania. Następnie potrząsnąć torebką i zanotować zmiany kolorów i kolor ostateczny.

Analiza kolorów:

1. Natychmiastowy kolor pomarańczowy przechodzący stopniowo w brąz wskazuje na obecność składników amfetaminy.
2. Pojawiający się kolor purpurowy (czasami poprzedzony pomarańczowym) wskazuje na obecność heroiny.
3. Powstanie koloru niebiesko-fioletowego wskazuje na obecność alkaloidów opium (np. morfina, kodeina)
4. Wystąpienie koloru czarnego wskazuje na obecność MDMA.
5. Inne kolory albo brak jakiegokolwiek koloru, oznacza obecność innych narkotyków. W takim przypadku należy zwrócić się do Karty Kolorometrycznej i przeprowadzić kolejne testy wynikające z systemu progresywnego badania narkotyków.

OSTRZEŻENIE:

1. Większość odczynników zawiera silne kwasy. Po przeprowadzeniu badania należy użyć neutralizatora kwasowego z testu nr 06 lub N. Po wprowadzeniu neutralizatora torebka powinna być pozostawiona otwarta na czas 2 do 3 minut, a następnie ponownie zamknięta.
2. Po złamaniu amputek nie należy ich dalej kruszyć.
3. Pierwsza pomoc:

Po wdychaniu: Zapewnić doływ świeżego powietrza. Skonsultować się z lekarzem jeżeli objawy nie ustają.

Po połknięciu: Natychmiast wezwać pomoc medyczną.

Po kontakcie skóry z substancją: Zanieczyszczoną skórę zmyć dokładnie wodą i mydłem. Użyć kremu do rąk. Jeżeli wystąpi podrażnienie wynikłe z długotrwałego kontaktu i nie ustępuje, udać się do lekarza.

Po kontakcie oczu z substancją: Szeroko otwarte oczy płukać przez co najmniej 15 min. Skonsultować się z lekarzem.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dostępna na życzenie.

UWAGA:

Nie umieszczają w torebce substancji innych niż Test nr 06 lub N.