

Instrukcja użycia testu nr 20 „odczynnik Fast Blue B Salt” (NARK20020)

v.2020.1

UŻYCIE: Wykrywanie składników substancji - Marihuana, Haszysz, Hash-Oil, THC

UWAGA: Zastosowanie testu do wstępnej identyfikacji substancji wymaga potwierdzenia wyniku poprzez badania laboratoryjne.

Test 20-Instrukcja:

- Po usunięciu zapięcia należy umieścić w torebce:
 - Materiał roślinny - 2 do 3 włókien
 - Haszysz - niewielką ilość badanej substancji, która mieści się w kółku średnicy ok. 2 mm → O.
 - Hash-Oil - Ilość odpowiadająca główce od szpilki.
 - THC - Porcja pasująca na czubek pobieraka.
- Po zamknięciu torebki zapięciem należy wstrząsnąć nią w taki sposób, aby badana substancja opadła na jej dno.
- Trzymając torebkę napisami w swoją stronę, należy delikatnie łamać amputki od lewej do prawej.
- Złam lewą amputkę i wstrząsaj przez 30 sekund. Może ujawnić się bardzo jasny kolor piaskowy.
- Złam prawą amputkę i wstrząsaj przez 5 sekund. Następnie trzymaj poduszkę nieruchomo po kątem 45°.

Analiza kolorów:

- Lewa amputka nie powinna ujawnić żadnego koloru.
- Prawa amputka powinna ujawnić albo warstwy koloru czerwonego jasna nad ciemną, albo kolor czerwony.

OSTRZEŻENIE:

- Większość odczynników zawiera silne kwasy. Neutralizator kwasowy z Testu N, należy użyć po przeprowadzeniu badania. Po wprowadzeniu neutralizatora torebka powinna być pozostawiona otwarta na czas 2 do 3 minut, a następnie ponownie zamknięta.
- Po złamaniu amputek nie należy ich dalej kruszyć.
- Pierwsza pomoc:
 - Po wdychaniu:** Zapewnić doptyw świeżego powietrza. Skonsultować się z lekarzem jeżeli objawy nie ustają.
 - Po połknięciu:** Natychmiast wezwać pomoc medyczną.
 - Po kontakcie skóry z substancją:** Zanieczyszczoną skórę zmyć dokładnie wodą i mydłem. Użyć kremu do rąk. Jeżeli wystąpi podrażnienie wynikłe z długotrwałego kontaktu i nie ustępuje, udać się do lekarza.
 - Po kontakcie oczu z substancją:** Szeroko otwarte oczy płukać przez co najmniej 15 min. Skonsultować się z lekarzem.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dostępna na życzenie,

UWAGA:

Nie umieszczać w torebce substancji innych niż Test nr. 06 lub N.