

# Instrukcja użycia testu nr 26

## **α-PVP REAGENT (NARK20026)**

v.2020.1

**UŻYCIE:** Wykrywanie α-PVP (tylko proszek)

**ILOŚĆ PRÓBKII:** ● (Ilość mieszcząca się w kółku i średnicy ok. 2 mm)

**UWAGA:** Zastosowanie testu do wstępnej identyfikacji substancji wymaga potwierdzenia wyniku poprzez badania laboratoryjne.

### **Test 26-Instrukcja:**

1. Po usunięciu zapięcia należy umieścić w torebce niewielką ilość substancji równoważną ilości pokazanej powyżej.
2. Po zamknięciu torebki zapięciem należy w nią postukiwać w taki sposób, aby badana substancja opadła na jej dno.
3. Trzymając torebkę napisami w swoją stronę, należy złamać ampułki z lewej do prawej. Należy delikatnie ścisnąć środkową część ampułki koniuszkiem kciuka i palca wskazującego i złamać ampułkę.

### **Analiza kolorów:**

1. Złam lewą ampułkę i lekko wstrząsaj. α-PVP (proszek) uformuje różowy roztwór z niebieską warstwą przylegającą wokół substancji α-PVP.
2. Złam drugą ampułkę i lekko wstrząsaj. Pojawi się kolor niebieski przechodzący w różowy roztwór.
3. Złam trzecią ampułkę i lekko wstrząsaj. Pojawi się kolor niebieski poprzedzony warstwą różową nad niebieską.

### **OSTRZEŻENIE:**

1. Większość odczynników zawiera silne kwasy. Po przeprowadzeniu badania należy użyć neutralizatora kwasowego z testu nr 06 lub N. Po wprowadzeniu neutralizatora torebka powinna być pozostawiona otwarta na czas 2 do 3 minut, a następnie ponownie zamknięta.

2. Po złamaniu ampułek nie należy ich dalej kruszyć.

3. Pierwsza pomoc:

**Po wdychaniu:** Zapewnić doptyw świeżego powietrza. Skonsultować się z lekarzem jeżeli objawy nie ustają.

**Po połknięciu:** Natychmiast wezwać pomoc medyczną.

**Po kontakcie skóry z substancją:** Zanieczyszczoną skórę zmyć dokładnie wodą i mydłem. Użyć kremu do rąk. Jeżeli wystąpi podrażnienie wynikłe z długotrwałego kontaktu i nie ustępuje, udać się do lekarza.

**Po kontakcie oczu z substancją:** Szeroko otwarte oczy płukać przez co najmniej 15 min. Skonsultować się z lekarzem.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dostępna na życzenie.

**UWAGA:**

Nie umieszczać w torebce substancji innych niż Test nr 06 lub N.