

Instrukcja użycia testu nr 29

2C REAGENT (NARK20029)

v.2020.1

UŻYCIE: Wykrywanie 2C-B, 2C-C, 2C-E, 2C-I, 2C-N, 2C-T-7

ILOŚĆ PRÓBK: Po usunięciu zapięcia należy umieścić w torebce niewielką ilość badanej substancji, która mieści się w kółku średnicy ok. 2 mm → O (wszystkie substancje)

UWAGA: Zastosowanie testu do wstępnej identyfikacji substancji wymaga potwierdzenia wyniku poprzez badania laboratoryjne.

Test 29-Instrukcja:

1. Po usunięciu zapięcia należy umieścić w torebce niewielką ilość badanej substancji, która mieści się w kółku średnicy ok. 2 mm → O.
2. Po zamknięciu torebki zapięciem należy wstrząsnąć nią w taki sposób, aby badana substancja opadła na jej dno.
3. Trzymając torebkę napisami w swoją stronę, należy delikatnie ścisnąć środkową część ampułki w celu jej złamania. Następnie potrząsnąć torebką i zanotować zmiany kolorów i kolor ostateczny.

Analiza uzyskanych kolorów:

Powstałe kolory wskazują na obecność substancji 2C:

Ampułka 1	Ampułka 2	Wynik pozytywny dla:
Przejrzysty	Żółty	2C-B
Przejrzysty	Zielonkawo-żółty	2C-C
Przejrzysty	Jasnozielony	2C-E
Pomarańczowo-brązowy	Brązowy	2C-I
Rudawo-purpurowy	Rudawo-purpurowy	2C-N
Przejrzysty	Purpurowy	2C-T-7

OSTRZEŻENIE:

1. Większość odczynników zawiera silne kwasy. Neutralizator kwasowy z Testu N, należy użyć po przeprowadzeniu badania. Po wprowadzeniu neutralizatora torebka powinna być pozostawiona otwarta na czas 2 do 3 minut, a następnie ponownie zamknięta.
2. Po złamaniu ampułek nie należy ich dalej kruszyć.
3. Pierwsza pomoc:
Po wdychaniu: Zapewnić doływ świeżego powietrza. Skonsultować się z lekarzem jeżeli objawy nie ustają.
Po połknięciu: Natychmiast wezwać pomoc medyczną.
Po kontakcie skóry z substancją: Zanieczyszczoną skórę zmyć dokładnie wodą i mydłem. Użyć kremu do rąk. Jeżeli wystąpi podrażnienie wynikłe z długotrwałego kontaktu i nie ustępuje, udać się do lekarza.
Po kontakcie oczu z substancją: Szeroko otwarte oczy płukać przez co najmniej 15 min. Skonsultować się z lekarzem.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dostępna na życzenie,

UWAGA:

Nie umieszczać w torebce substancji innych niż Test nr. 06 lub N.