

Instrukcja użycia testu nr 02 „odczynnik Kwas Azotowy” (NARK2002)

v.2020.1

UŻYCIE: Wykrywanie składników substancji - Metamfetamina, Heroina, kodeina/morfina oraz rozpoznawanie innych substancji.

UWAGA: Test nie powinien być używany samodzielnie, ale jako następny po Teście nr. 01. **Zastosowanie testu do wstępnej identyfikacji substancji wymaga potwierdzenia wyniku poprzez badania laboratoryjne.**

Test 02-Instrukcja:

1. Po usunięciu zapięcia należy umieścić w torebce niewielką ilość badanej substancji, która mieści się w kółku średnicy ok. 2 mm → O.
2. Po zamknięciu torebki zapięciem należy wstrząsnąć nią w taki sposób, aby badana substancja opadła na jej dno.
3. Trzymając torebkę napisami w swoją stronę, należy delikatnie ścisnąć środkową część ampułki w celu jej złamania. Następnie potrząsnąć torebką i zanotować zmiany kolorów i kolor ostateczny.

Analiza kolorów:

1. Kolor pomarańczowy powoli przechodzący w żółty wskazuje na obecność kodeiny.
2. Kolor pomarańczowy gwałtownie przechodzący w czerwony, a następnie w żółty wskazuje na obecność morfiny. (należy zwrócić szczególną uwagę na obecność koloru czerwonego).
3. Początkowy kolor żółty zmieniający się w jasny zielony wskazuje na obecność heroiny.

W tym teście amfetaminy nie wykażą żadnego koloru, natomiast metaamfetaminy ujawnią kolor jasno żółty. (UWAGA: Dodatkowe kolory mogą pojawić się w wyniku obecności innych narkotyków. W takim przypadku należy zwrócić się do Karty Kolorometrycznej i przeprowadzić kolejne testy wynikające z systemu progresywnego badania narkotyków.

OSTRZEŻENIE:

1. Większość odczynników zawiera silne kwasy. Po przeprowadzeniu badania należy użyć neutralizatora kwasowego z testu nr 06 lub N. Po wprowadzeniu neutralizatora torebka powinna być pozostawiona otwarta na czas 2 do 3 minut, a następnie ponownie zamknięta.
2. Po złamaniu ampułek nie należy ich dalej kruszyć.
3. Pierwsza pomoc:

Po wdychaniu: Zapewnić doływ świeżego powietrza. Skonsultować się z lekarzem jeżeli objawy nie ustają.

Po połknięciu: Natychmiast wezwać pomoc medyczną.

Po kontakcie skóry z substancją: Zanieczyszczoną skórę zmyć dokładnie wodą i mydłem. Użyć kremu do rąk. Jeżeli wystąpi podrażnienie wynikłe z długotrwałego kontaktu i nie ustępuje, udać się do lekarza.

Po kontakcie oczu z substancją: Szeroko otwarte oczy płukać przez co najmniej 15 min. Skonsultować się z lekarzem.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dostępna na życzenie,

UWAGA:

Nie umieszczać w torebce substancji innych niż Test nr 06 lub N.