

Instrukcja użycia testu nr 30

„Odczynnik Psylocybina/Psylocyna (Grzyby Halucynogenne)” (NARK20030)

v.2020.1

UŻYCIE: Wykrywanie substancji - Psylocybina, Psylocyna (grzyby halucynogenne)

UWAGA: Test ten powinien być używany w połączeniu z innymi odczynnikami wchodzącymi w skład Progredywnego Systemu Badania NARK®II. **Zastosowanie testu do wstępnej identyfikacji substancji, wymaga potwierdzenia wyniku poprzez badania laboratoryjne.**

Test 30-Instrukcja:

- Po usunięciu zapięcia należy umieścić w torebce niewielką ilość badanej substancji, w sposób następujący:
 - Świeży grzyb - ilość mieszcząca się w polu 4 x 4 mm
 - Wysuszony grzyb - (ilość mieszcząca się w polu 4 x 4 mm
 - Proszek - ilość mieszcząca się w okręgu o śr. ok. 2 mm
- Po zamknięciu torebki zapięciem należy wstrząsnąć nią w taki sposób, aby badana substancja opadła na jej dno.
- Trzymając torebkę napisami w swoją stronę, należy złamać ampułki z lewej do prawej. Należy delikatnie ścisnąć środkową część ampułki koniuszkiem kciuka i palca wskazującego i złamać ampułkę.

Analiza uzyskanych kolorów:

- Psylocybina:** Należy złamać lewą ampułkę i potrząsać przez 30 sekund. Kolor nie pojawi się. Następnie należy złamać prawą ampułkę i potrząsać przez 30 sekund. W ciągu 30 sekund pojawi się jaskrawo różowy kolor.
- Psylocyna:** Należy złamać lewą ampułkę i potrząsać przez 30 sekund. Kolor nie pojawi się. Następnie należy złamać prawą ampułkę i potrząsać przez 30 sekund. Szybko pojawi się kolor purpurowy.

OSTRZEŻENIE:

- Większość odczynników zawiera silne kwasy. Po przeprowadzeniu badania należy użyć neutralizatora kwasowego z testu nr 06. Po wprowadzeniu neutralizatora torebka powinna być pozostawiona otwarta na czas 2 do 3 minut, a następnie ponownie zamknięta.
- Po złamaniu ampułek nie należy ich dalej kruszyć.
- Pierwsza pomoc:
Szeroko otwarte oczy lub skórę płukać przez co najmniej 15 min.
Po połknięciu:
Natychmiast wezwać pomoc medyczną.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych dostępna na życzenie.

UWAGA:

Nie umieszczać w torebce substancji innych niż Test nr 06. Należy przeczytać instrukcję wykonania przy pracy z podejrzanymi substancjami.

ILOŚĆ PRÓBK:

Świeży/wysuszony grzyb – ilość mieszcząca się w polu 4 x 4 mm

Proszek – ilość mieszcząca się w okręgu o średnicy 2 mm

