

Instrukcja użycia testu nr 32 Mollies Reagent (NARK20032)

v.2020.1

UŻYCIĘ: Wstępne wykrywanie MDMA, Analogi MDMA, Amfetamina/Meth, Substancje 2C (N-BOM-e), MDPV, Metylon

UWAGA: Zastosowanie testu do wstępnej identyfikacji substancji wymaga potwierdzenia wyniku poprzez badania laboratoryjne.

Ilość próbki testowej: ● (ilość mieszcząca się w kółku o śr. ok. 1,5- 2 mm)

Test 32-Instrukcja:

1. Należy usunąć zapięcie i urządzenie ładujące (przymocowane do torebki za pomocą zapięcia). Za pomocą urządzenia ładującego umieścić w torebce niewielką ilość substancji równoważną ilości pokazanej powyżej.
2. Należy zamknąć mocno torebkę na twardej powierzchni i zmienić zapięcie na torebce (zarówno urządzenie ładujące jak i badana substancja powinny być w środku).
3. Trzymając torebkę napisami w swoją stronę, należy złamać ampułkę poprzez delikatnie ściśnięcie środkowej części ampułki koniuszkiem kciuka i palca wskazującego. Należy potrząsać torebką i zanotować kolor lub zmiany koloru.

Analiza uzyskanych kolorów:

Następujące kolory wskazują na obecność substancji Mollies:

Kolor	Substancja	Następny test
Natychmiast czarny	MDMA/ Analogi MDMA	NARK20015
Pomarańczowy do czarnego (12 sek.)	Amfetamina/Meth	NARK20015
Żółty	2C/MDPV/Metylon	NARK20029
Żółty/Zielony	2C/MDPV/Metylon	NARK20029
Bezbarwny	2C/MDPV/Metylon	NARK20029

OSTRZEŻENIE:

1. Większość odczynników zawiera silne kwasy. Po przeprowadzeniu badania należy użyć neutralizatora kwasowego z testu nr 06 lub N. Po wprowadzeniu neutralizatora torebka powinna być pozostawiona otwarta na czas 2 do 3 minut, a następnie ponownie zamknięta.
2. Po złamaniu ampułek nie należy ich dalej kruszyć.
3. Pierwsza pomoc:
Po wdychaniu: Zapewnić dopływ świeżego powietrza. Skonsultować się z lekarzem jeżeli objawy nie ustają.
Po połknięciu: Natychmiast wezwać pomoc medyczną.
Po kontakcie skóry z substancją: Zanieczyszczoną skórę zmyć dokładnie wodą i mydłem. Użyć kremu do rąk. Jeżeli wystąpi podrażnienie wynikłe z długotrwałego kontaktu i nie ustępuje, udać się do lekarza.
Po kontakcie oczu z substancją: Szeroko otwarte oczy płukać przez co najmniej 15 min. Skonsultować się z lekarzem.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dostępna na życzenie.

UWAGA:

Nie umieszczać w torebce substancji innych niż Test nr 06 lub N.