

Instrukcja użycia testu nr 04 „odczynnik Ehrlicha” (NARK2004)

v.2020.1

UŻYCIE: Wykrywanie składników substancji-LSD.

UWAGA: Zastosowanie testu do wstępnej identyfikacji substancji wymaga potwierdzenia wyniku poprzez badania laboratoryjne.

Test 04-Instrukcja:

- Po usunięciu zapiecia należy umieścić w torebce:
 - Suszka kwasowa-Nie więcej niż 1/4 wymiaru.
 - Kostka – niewielką ilość badanej substancji, która mieści się w kółku średnicy ok. 2 mm → O.
 - Butelka -Zobacz instrukcje badania płynów.
 - Mikro tabletki-1/4 lub 1/2 skompresowanej tabletki
 - Znaczkki -1/4 standardowego znaczka.
- Po zamknięciu torebki zapieciem należy wstrząsnąć nią w taki sposób, aby badana substancja opadła na jej dno.
- Trzymając torebkę napisami w swoją stronę, należy delikatnie łamać ampułki od lewej do prawej.

Analiza kolorów:

- Złam lewą ampułkę i dokładnie wstrząsaj przez około 30 sekund.
- Złam środkową ampułkę i ponownie dokładnie wstrząsaj przez 30 sekund. W ciągu 30-60 sekund powinien pojawić się kolor jasny purpurowy co wstępnie wskazuje na obecność LSD.
- Złam prawą ampułkę. Zwiększenie się intensywności koloru purpurowego oznacza obecność LSD.

OSTRZEŻENIE:

- Większość odczynników zawiera silne kwasy. Po przeprowadzeniu badania należy użyć neutralizatora kwasowego z testu nr 06 lub N. Po wprowadzeniu neutralizatora torebka powinna być pozostawiona otwarta na czas 2 do 3 minut, a następnie ponownie zamknięta.
- Po złamaniu ampułek nie należy ich dalej kruszyć.
- Pierwsza pomoc:
Po wdychaniu: Zapewnić doptyw świeżego powietrza. Skonsultować się z lekarzem jeżeli objawy nie ustają.
Po połknięciu: Natychmiast wezwać pomoc medyczną.
Po kontakcie skóry z substancją: Zanieczyszczoną skórę zmyć dokładnie wodą i mydłem. Użyć kremu do rąk. Jeżeli wystąpi podrażnienie wynikłe z długotrwałego kontaktu i nie ustępuje, udać się do lekarza.
Po kontakcie oczu z substancją: Szeroko otwarte oczy płukać przez co najmniej 15 min. Skonsultować się z lekarzem.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dostępna na życzenie.

UWAGA:

Nie umieszczać w torebce substancji innych niż Test nr 06 lub N.