

# Instrukcja użycia testu nr 05 „odczynnik Duquenois-Levine” (NARK2005)

v.2020.1

**UŻYCIE:** Wykrywanie składników substancji – Wykrywanie produktów Cannabis (Marihuana, Hashish, Hash-Oil, THC)

**UWAGA:** Odczynnik Duquenois-Levine jest testem wstępnym w systemie badania progresywnego narkotyków. W celu wykonania następnego kroku należy zwrócić się do Karty Kolorometrycznej. **Zastosowanie testu do wstępnej identyfikacji substancji wymaga potwierdzenia wyniku poprzez badania laboratoryjne.**

## Test 05-Instrukcja:

1. Po usunięciu zapiecia należy umieścić w torebce niewielką ilość badanej substancji, która mieści się w kółku średnicy ok. 2 mm → O. Produkt roślinny umieszczamy w ilości kilku centymetrów.
2. Po zamknięciu torebki zapieciem należy wstrząsnąć nią w taki sposób, aby badana substancja opadła na jej dno.
3. Trzymając torebkę napisami w swoją stronę, należy delikatnie tłamać ampułki od lewej do prawej, a następnie potrząsać torebką, obserwując zmiany kolorów i kolor ostateczny.

## Analiza kolorów:

1. Po złamaniu lewej ampułki i wstrząsaniu ok. 1 min nie powinien pojawić się żaden kolor lub może wystąpić delikatny osad.
2. Złam środkową ampułkę i wstrząsaj 1 – 2 min obserwując pojawianie się koloru purpurowego. (aby nie dopuścić do nadmiernego ściemnienia koloru purpurowego należy złamać prawą ampułkę. Jeżeli po złamaniu środkowej ampułki wystąpi kolor niebieski może oznaczać to, że dodano za dużo materiału, zbyt długo wstrząsaliśmy torebką lub obecne są inne substancje).
3. Złam prawą ampułkę i wstrząsaj 1-2 sek., a następnie trzymaj torebkę nieruchomo. Jeżeli substancja rozwarstwi się na kolor szary na górze i purpurowo-niebieski na dole, przypuszczalnie potwierdza to obecność konopi siewnej lub jej ekstraktów (Uwaga: Jeżeli po złamaniu prawej ampułki warstwy ułożą się odwrotnie, należy ponownie wstrząsnąć torebką i poczekać na rozdzielenie się substancji)

## OSTRZEŻENIE:

1. Większość odczynników zawiera silne kwasy. Po przeprowadzeniu badania należy użyć neutralizatora kwasowego z testu nr 06 lub N. Po wprowadzeniu neutralizatora torebka powinna być pozostawiona otwarta na czas 2 do 3 minut, a następnie ponownie zamknięta.
2. Po złamaniu ampułek nie należy ich dalej kruszyć.
3. Pierwsza pomoc:  
**Po wdychaniu:** Zapewnić dopływ świeżego powietrza. Skonsultować się z lekarzem jeżeli objawy nie ustają.  
**Po połknięciu:** Natychmiast wezwać pomoc medyczną.  
**Po kontakcie skóry z substancją:** Zanieczyszczoną skórę zmyć dokładnie wodą i mydłem. Użyć kremu do rąk. Jeżeli wystąpi podrażnienie wynikłe z długotrwałego kontaktu i nie ustępuje, udać się do lekarza.  
**Po kontakcie oczu z substancją:** Szeroko otwarte oczy płukać przez co najmniej 15 min. Skonsultować się z lekarzem.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dostępna na życzenie.

**UWAGA:**

Nie umieszczać w torebce substancji innych niż Test nr 06 lub N.