

Instrukcja użycia testu nr 07 „odczynniki Scotta” (NARK2007)

v.2020.1

UŻYCIE: Wykrywanie-Sole kokainowe, baza kokainowa (Crack)

UWAGA: Zastosowanie testu do wstępnej identyfikacji substancji wymaga potwierdzenia wyniku poprzez badania laboratoryjne.

Test 07-Instrukcja:

- Po usunięciu zapięcia należy umieścić w torebce:
 - Sole kokainowe - niewielką ilość badanej substancji, która mieści się w kółku średnicy ok. 2 mm → O.
 - Baza kokainowa (crack) - Ilość odpowiadająca główce od szpilki.
- UWAGA:** WYMAGANA ILOŚĆ substancji badanej to około 3-5 mg.
- Po zamknięciu torebki zapięciem należy wstrząsnąć nią w taki sposób, aby badana substancja opadła na jej dno.
 - Trzymając torebkę napisami w swoją stronę, należy delikatnie tamać ampułki od lewej do prawej.

Analiza kolorów:

- Złam lewą ampułkę i krótko wstrząśnij torebką. Sole kokainowe (HCL) szybko zabarwią się na kolor intensywny niebieski, baza kokainowa (crack) zabarwi się na niebiesko.
- Złam środkową ampułkę. Sole kokainowe zmienią kolor z niebieskiego na różowy. Crack stopniowo straci swój niebieski kolor i/lub rozłoży się.
- Złam prawą ampułkę. Krótko wstrząśnij i przytrzymaj torebkę nieruchomo. W przypadku, gdy badana jest substancja będąca połączeniem soli kokainowych i bazy kokainowej, zabarwienie przyjmie postać warstw z kolorem różowym na górze i niebieskim na dnie

UWAGA: Łamiąc ampułki od lewej do prawej prawidłowa sekwencja potwierdzająca obecność soli kokainowych powinna wyglądać następująco : kolor niebieski, różowy, różowo-niebieski.

- Jeżeli mała bryłka bazy kokainowej nie została skruszona, po zastosowaniu pierwszej ampułki przyjmie ona kolor niebieski. Natomiast po zastosowaniu drugiej ampułki utraci kolor, aby po skruszeniu trzeciej ampułki ujawnić kolor różowo-niebieski.
- Ślad koloru lawendowego bardziej niż niebieskiego wskazuje na obecność niektórych z adulterantów.

OSTRZEŻENIE:

- Większość odczynników zawiera silne kwasy. Po przeprowadzeniu badania należy użyć neutralizatora kwasowego z testu nr 06 lub N. Po wprowadzeniu neutralizatora torebka powinna pozostać otwarta na czas 2 do 3 minut, a następnie ponownie zamknięta.
- Po złamaniu ampułek nie należy ich dalej kruszyć.
- Pierwsza pomoc:

Po wdychaniu: Zapewnić doływ świeżego powietrza. Skonsultować się z lekarzem jeżeli objawy nie ustają.

Po połknięciu: Natychmiast wezwać pomoc medyczną.

Po kontakcie skóry z substancją: Zanieczyszczoną skórę zmyć dokładnie wodą i mydłem. Użyć kremu do rąk. Jeżeli wystąpi podrażnienie wynikłe z długotrwałego kontaktu i nie ustępuje, udać się do lekarza.

Po kontakcie oczu z substancją: Szeroko otwarte oczy płukać przez co najmniej 15 min. Skonsultować się z lekarzem.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dostępna na życzenie,

UWAGA:

Nie umieszczać w torebce substancji innych niż Test nr 06 lub N.