

Instrukcja użycia testu nr 09

„odczynniki PCP” fencyklidyna HCL (NARK2009)

v.2020.1

UŻYCIE: PCB (nie do GBL lub 1,4 Butanodil)

UWAGA: Zastosowanie testu do wstępnej identyfikacji substancji wymaga potwierdzenia wyniku poprzez badania laboratoryjne.

Test 09-Instrukcja:

1. Po usunięciu zapięcia należy umieścić w torebce niewielką ilość badanej substancji, która mieści się w kółku średnicy ok. 2 mm → O.
2. Po zamknięciu torebki zapięciem należy popukać w nią w taki sposób, aby badana substancja opadła na jej dno.
3. Trzymając torebkę napisami w swoją stronę, należy złamać ampułki od lewej do prawej. Delikatnie ściskając środkową część ampułki w celu jej złamania

Analiza kolorów:

1. Złamać lewą ampułkę i wstrząsać nią przez 30 sekund. Na tym etapie nie spodziewać się żadnego koloru.
2. Złamać prawą ampułkę. Jeżeli jest obecna niższa klasa PCP, wtedy wystąpią niebieskie plamki na różowym tle. Jeżeli jest obecna wyższa klasa PCP występuje jednolity kolor niebieski
3. Uwaga: Test ten powinien być używany w połączeniu z innymi odczynnikami NARK® Progressive Testing System

OSTRZEŻENIE:

1. Większość odczynników zawiera silne kwasy. Po przeprowadzeniu badania należy użyć neutralizatora kwasowego z testu nr 06. Po wprowadzeniu neutralizatora torebka powinna być pozostawiona otwarta na czas 2 do 3 minut, a następnie ponownie zamknięta.
2. Po złamaniu ampułek nie należy ich dalej kruszyć.
3. Pierwsza pomoc: Przemycać oczy lub skórę wodą przynajmniej przez 15 minut.
4. W przypadku spożycia natychmiast skontaktować się z lekarzem

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dostępna na życzenie.

UWAGA:

Nie umieszczać w torebce substancji innych niż Test nr 06 lub N.